

Návod k použití

Nerezové kazety:

Kazety jsou vyrobené z nerezavějící oceli. Přesto je nutné s nimi zacházet dle následujících pokynů tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení.

Kazety by neměly být dlouhodobě vystavovány působení halogenových prvků (fluor, chlor, jod), alkalických roztoků, kyselin a minerálů. Je nevhodné nerezové kazety ponechávat i v pitné vodě neboť mohou obsahovat výše uvedené prvky.

Čištění a dezinfekce:

Nerezové kazety je nutné důkladně omýt a očistit v čisté vodě od krve, tkání nebo sekretu a to ihned po použití. Na čištění nerezových kazet nepoužívejte brusné a čisticí materiály (co obsahují brusnou složku) ani prostředky.

Potom nerezovou kazetu (misku a víko) omyjte destilovanou vodou a nerezovou kazetu dosucha vytřete měkkým a čistým hadrem (misku a víko).

S nerezovými kazetami zacházejte vždy šetrně a pokládejte nerezové kazety vedle sebe nikoliv přes sebe.

Nakonec nerezové kazety promažte nekorozivním sterilním olejem.

Sterilizace:

Sterilizaci provádějte v parním sterilizátoru do 145°C, nebo horkovzdušném sterilizátoru do 200°C. Nerezové kazety jsou vhodné pro sterilizaci v horkovzdušném sterilizátoru.

Veškerou sterilizaci provádějte v souladu s nařízením hlavního hygienika.

Prodejce: Dalibor Hanus, Prostorná 958/10, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, mobil: 777 881 428, e-mail: moravaelektro@seznam.cz, www.moravaelektro.cz